

Geistlich
Mucograft® Seal

Maximize seus resultados estéticos
com mínima invasão



NOVO!



Indicações técnicas

Para o uso do Geistlich Mucograft® Seal
em Alvéolos Pós-Extração

Indicações técnicas para o uso do Geistlich Mucograft® Seal e Geistlich Bio-Oss® Collagen em procedimentos de Preservação da Crista em alvéolos pós-extração

Geistlich Mucograft® Seal é uma alternativa aos enxertos autógenos de tecido mole e é recomendada para o uso em alvéolos pós-extração com «preservação de crista sem defeito» em combinação com Geistlich Bio-Oss® Collagen como material para preenchimento alveolar.

Baseado em mais de cinco anos de experiência clínica com Geistlich Mucograft® e no consenso da Reunião do Conselho Consultivo Geistlich Mucograft® Seal (2013), as indicações técnicas para a Geistlich Mucograft® Seal usada com Geistlich Bio-Oss® Collagen são:

- > É recomendado o uso de Geistlich Mucograft® Seal com Geistlich Bio-Oss® Collagen após a extração atraumática de dentes quando as paredes alveolares forem preservadas. A definição do alvéolo pós-extração preservado varia, podendo incluir defeitos ósseos menores de o a 50% da parede óssea vestibular.
- > Geistlich Mucograft® Seal deve ser usada associada ao material para preenchimento alveolar (por ex., Geistlich Bio-Oss® Collagen).
- > Geistlich Mucograft® Seal pode ser usada sem a necessidade de pré-hidratação ou lavagem. Ela deve ser manipulada e aplicada a seco.
- > Antes de aplicar a Geistlich Mucograft® Seal, as margens adjacentes do tecido mole devem ser desepitelizadas. Isso permite às células epiteliais migrarem da borda do tecido mole para dentro da matriz.
- > Orientação da Geistlich Mucograft® Seal: A estrutura compacta da matriz deve ficar voltada para fora e a estrutura esponjosa, para o alvéolo. A estrutura esponjosa da Geistlich Mucograft® Seal é rugosa para permitir uma melhor distinção dos dois lados.
- > Geistlich Mucograft® Seal deve ser suturada com pontos não absorvíveis e não unidos. A adaptação da matriz junto às bordas do tecido pode ser complementada com suturas em pontos únicos separados, suturas em pontos duplos separados ou suturas cruzadas.
- > O cirurgião deve selecionar o material de sutura mais fino possível e de uso mais confortável: para suturas em pontos únicos separados, recomendam-se suturas no tamanho 6.0 ou 5.0 e, para suturas cruzadas, suturas no tamanho 5.0.
- > Na sutura da Geistlich Mucograft® Seal, assegure-se de que as margens da matriz fiquem bem justas às bordas do tecido mole marginal desepitelizado do alvéolo pós-extração evitando tensões.
- > Uma restauração provisória, tanto removível como fixa, não deve exercer pressão no enxerto ou causar impactos no tecido.
- > O protocolo da Geistlich Mucograft® Seal deve ser seguido com biotipos gengivais espessos e finos.
- > Os critérios de seleção do paciente, uma área livre de infecção e a colaboração do paciente são fatores importantes para um sucesso terapêutico.



Abra a embalagem blister da Geistlich Mucograft® Seal com cuidado. Uma abertura rápida ou descontrolada da embalagem pode fazer com que o produto caia.